

## Zelfklevend foamkompres voor de gevoelige huid



# ALLEVYN<sup>®</sup> Gentle Border, zelfklevend foamkompres voor de gevoelige huid

ALLEVYN Gentle Border is een absorberend zelfklevend foamkompres voorzien van een siliconengel kleeflaag. ALLEVYN Gentle Border bestaat uit een drielaagse structuur:

- 1 een geperforeerde wondcontactlaag met een siliconengel kleeflaag
- 2 een absorberende hydrocellulaire foamskern
- 3 een topfilm welke waterdicht en ondoordringbaar voor bacteriën is

## Voordelen

De geavanceerde drielaagse structuur van ALLEVYN Gentle Border zorgt voor dynamisch vochtmanagement om een optimaal vochtig wondmilieu te creëren, waardoor snellere genezing plaatsvindt en er minder kans op maceratie is. De wondcontactlaag van ALLEVYN Gentle Border is gecoat met een siliconengel kleeflaag die atraumatisch en pijnloos verwijderd kan worden bij verbandwisselingen. ALLEVYN Gentle Border kompressen zijn zacht en soepel waardoor het kompres comfortabel is en de patiënt beschermd wordt bij verbandwisselingen. ALLEVYN Gentle Border is eenvoudig in gebruik en kan opgetild en opnieuw aangebracht worden zonder de klevende eigenschappen te verliezen. ALLEVYN Gentle Border is geschikt voor gebruik op een gevoelige en/of droge huid.

- Zelfklevend kompres
- Waterdicht en ondoordringbaar voor bacteriën
- Atraumatisch voor wond en omliggende huid
- Eenvoudig aan te brengen en te verwijderen
- Zacht en comfortabel, geen restanten
- Pijnloos voor de patiënt
- Vochtig wondmilieu voor optimale genezing
- Opnieuw aan te brengen

## Indicaties



Wondverzorging van chronische en acute exsuderende wonden, oppervlakkige of granulerende wonden zoals decubitus, beenulcera, diabetische ulcera, oncologische wonden, chirurgische wonden, eerste- en tweedegraads brandwonden en donorplaatsen.

## Applicatie

Reinig de wond en droog de randen volgens lokaal klinisch protocol. Verwijder het beschermepapier van ALLEVYN Gentle Border. Breng het kompres met de klevende zijde op de wond aan. ALLEVYN Gentle Border kan op maat geknipt worden om op moeilijke plaatsen gebruikt te worden. Gebruik altijd een aseptische techniek bij het knippen van het kompres. ALLEVYN Gentle Border kan opnieuw worden aangebracht zonder de klevende eigenschappen te verliezen. ALLEVYN Gentle Border kan tot 7 dagen in situ blijven, maar dient eerder verwisseld te worden indien het exsudaat doorlekt.

## Voorzorgsmaatregelen

ALLEVYN Gentle Border kompressen niet gebruiken in combinatie met oxiderende producten of hypochloriet oplossingen (bijv. Eusol) of waterstofperoxide, omdat deze producten de absorberende polyurethaan componenten van het kompres kunnen aantasten.

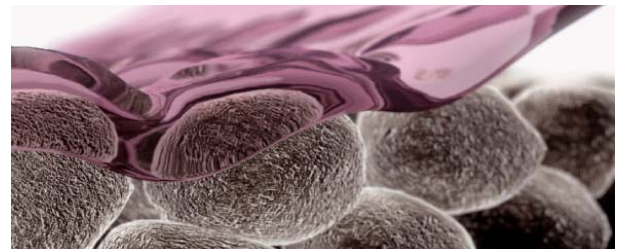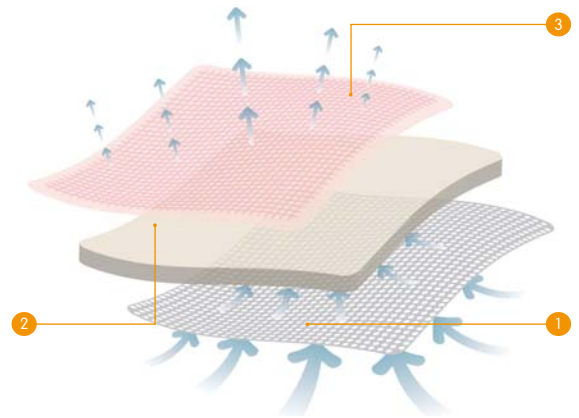

Bijzonder zacht bij het aanbrengen door de siliconengel kleeflaag



De siliconengel kleeflaag voorkomt elke vorm van weefselbeschadiging bij verwijderen van het kompres

Bestelnummer	Afmeting	Verpakking
66800269	7,5 x 7,5 cm	10
66800270	10 x 10 cm	10
66800272	12,5 x 12,5 cm	10
66800273	17,5 x 17,5 cm	10

### Wondverzorging

Smith & Nephew B.V.  
Postbus 525, 2130 AM Hoofddorp  
Kruisweg 637, 2132 NB Hoofddorp  
T 020 - 654 39 99  
F 020 - 653 20 99  
E [holland.info@smith-nephew.com](mailto:holland.info@smith-nephew.com)

[www.smithnephew.nl](http://www.smithnephew.nl)  
[www.allevyn.com](http://www.allevyn.com)