


Prontosan® Wondreinigingsvloeistof



Prontosan® als startpunt voor wondgenezing want... alleen een schone wond kan genezen.


B | BRAUN
SHARING EXPERTISE

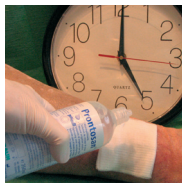

Open de fles, verwijder de ring en draai de dop opnieuw op de fles. Hierdoor wordt de fles geopend. Doordrenk gazen royaal met Prontosan® vloeistof. Bij voorkeur Prontosan® verwarmen tot lichaamstemperatuur zodat afkoeling van de wond zoveel mogelijk wordt beperkt.



Druk de gaaskompressen licht aan. Laat de gaaskompressen 10 tot 15 minuten zitten.

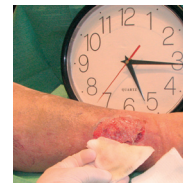

Verwijder daarna de gaaskompressen. Begin met de verdere behandeling van de wond, met verbandsoort naar eigen keuze eventueel in combinatie met Prontosan® gel voor een langdurige inwerking bij diepe wonden: breng een laag Prontosan® gel aan in de wond en dek deze af met verbandsoort naar keuze.

Prontosan als startpunt voor wondgenezing, want... alleen een schone wond kan genezen!

Artikelnr.	Z-Index	Artikelomschrijving	Latexvrij	Steriel	Houdbaar
400412	15280837	Prontosan® Oplissing 40 ml	ja	ja	36 mnd
400403	15280845	Prontosan® Oplissing 350 ml	ja	ja	36 mnd
400505	15290883	Prontosan® Gel 30 ml	ja	ja	24 mnd

B | BRAUN
SHARING EXPERTISE

Prontosan®

Oplossing voor wondspoeling voor het reinigen, spoelen en bevochtigen van acute en chronische wonden.


Wanneer gebruik je Prontosan®

Chronische wonden zijn vaak bedekt met fibrinebeslag, necrotisch weefsel en/of een biofilm. Deze lagen zijn vaak moeilijk te verwijderen en vertragen de normale wondgenezing. Daarom is het belangrijk om een wondreinigingsmiddel met een uitstekend reinigende werking te gebruiken zodat je meer bereikt dan met water.


Wat is "biofilm"?

Een biofilm is een symbiotische levensvorm van diverse soorten bacteriën. De bacteriën beschermen zichzelf door zich in te kapselen in een matrix, waarbij ze een microkolonie vormen die moeilijk te doordringen is. Hierdoor:

- kunnen antibiotica en antiseptica moeilijk inwerken;
- wordt het wondgenezingsproces vertraagd en;
- wordt het natuurlijke immuunsysteem minder geprikkeld.

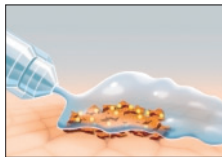

De wondspoelvloeistoffen NaCl/water/ringer **glijden over de biofilm zonder deze te verwijderen**

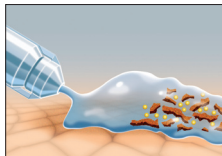

Prontosan® verwijdert de biofilm door de structuur open te breken

Prontosan® zorgt voor een **fysieke inwerking**



De oppervlaktespanning van **Prontosan®** is **lager** dan de oppervlaktespanning van water. Hierdoor kan **Prontosan®** de biofilm doordringen.

Prontosan® Water

Ook bij acute wonden is een goede reiniging belangrijk, aangezien deze wonden doorgaans gecontamineerd zijn met lichaamsvreemde deeltjes, debris en micro-organismen. Het is welbekend dat bij acute wonden een dergelijke contaminatie een ongunstige invloed kan hebben op het normale genezingsproces van de wond, een vertraging van de genezing kan veroorzaken en aanleiding kan geven tot complicaties zoals een infectie. Door te reinigen met Prontosan® kan een wondverband pas echt doen waar het voor bedoeld is.

Prontosan® wondspoelmiddel (klaar voor gebruik)

- optimale voorbereiding van het wondbed
- snelle en effectieve verwijdering van biofilm, fibrinelagen en debris
- reduceert wondgeur
- steriel, houdbaar tot acht weken na opening
- hypo-allergeen en niet toxisch

Prontosan® wondgel

- voor verwijdering van debris
- creëert een vochtig wondmilieu
- mag in de wond aanwezig blijven tot volgende verbandwissel
- huidvriendelijk
- is te combineren met alle soorten wondverbanden

Prontosan® is bewezen effectief in het verwijderen van biofilm en kosteneffectief

